

## Restauro anteriore di classe III

Procedura/Studio del  
Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia - Italia

**Unica**  
anterior  
  
powered by:  
**STYLE ITALIANO**<sup>TM</sup>



Il Dott. Chiodera si è laureato in Odontoiatria presso l'Università di Brescia. Nel 2004 ha vinto una borsa di studio alla Kings College University di Londra.

Membro di Style Italiano, il Dott. Chiodera ha uno studio odontoiatrico privato in Italia dal 2006, dedicato principalmente all'odontoiatria conservativa e all'endodonzia.

Il Dott. Chiodera è anche molto attivo come autore di articoli per riviste nazionali e internazionali, oltre che come docente in molte Università.

## Caso clinico

Il paziente è giunto alla nostra attenzione per un controllo periodico. Una prima analisi ha rivelato una lesione cariosa di classe III sull'incisivo 21; dopo alcune riflessioni si è deciso di procedere con l'eliminazione della lesione cariosa seguita da una procedura di restauro diretta in composito

Il caso clinico seguente mostra tutti i passaggi della procedura di restauro utilizzando la matrice Unica anterior di Polydentia



01

Visione pre-operatoria degli incisivi 11 e 21. Si noti la lesione cariosa sull'incisivo 21, mesiale. Un pre-wedging è stato eseguito prima di procedere con il restauro per permettere un posizionamento più semplice della matrice.



02

La situazione clinica dopo la rimozione della lesione cariosa e successiva pulizia della zona prossimale.



03

Mordenzatura della cavità: è una buona prassi proteggere il dente adiacente utilizzando un nastro in Teflon



04

La matrice Unica posizionata sull'incisivo 21 e fissata utilizzando un cuneo in legno. La forma anatomica della matrice abbraccia le pareti cervicali e prossimali del dente aiutando il Medico Dentista a visualizzare la posizione del bordo prossimale prima di procedere con il restauro.



05

L'incisivo 21 dopo il riempimento della cavità utilizzando del composito



06

La situazione post-operatoria dopo i processi di finitura e lucidatura. La forma anatomica della matrice assicura una morfologia prossimale ottimale e riduce in modo consistente le operazioni di finitura necessarie.

## Conclusione

Unica anterior powered by Style Italiano è uno strumento molto performante per i restauri diretti in composito sui denti anteriori.

Grazie alla sua forma anatomica, Unica si adatta correttamente alle differenti morfologie e permette di restaurare in maniera semplice e veloce i contorni inter-prossimali, anche in presenza di cavità di classe III molto estese che compromettono in modo consistente il profilo del dente.

