

unica anterior



powered by:

STYLE ITALIANO™

la soluzione
per restauri
anteriori

matrix
systems



polydentia
swiss manufacture +



1 Ricostruzione dei margini interprossimali e cervicali in un solo passaggio

2 Profilo anatomico per un restauro corretto dei margini interprossimali

3 Alette per posizionamento ed adattamento semplice della matrice

4 Gestione semplificata della zona cervicale: restauro prevedibile e/o retrazione gengivale

unica anterior



"Nell'odontoiatria conservativa moderna, la scelta dei prodotti e delle tecniche che utilizziamo ogni giorno deve essere prevedibile e conveniente, incorporando chiari vantaggi nelle nostre procedure quotidiane. Unica è la soluzione per i restauri anteriori di tutti i giorni, che si tratti di classe III, IV, V, modifiche di forma e/o faccette in composito in tecnica diretta. Una matrice efficace per risultati anteriori estetici e funzionali quotidiani."

Dr. Jordi Manauta, DDS
Head of Styleitaliano Idea Factory
Sestri Levante, Italia

Unica è la matrice ideale per effettuare i restauri anteriori quali Classe III, IV, V, faccette in composito in tecnica diretta, e modifiche di forma. Unica, grazie alla sua forma bombata si adatta in modo ottimale alle diverse morfologie dei denti anteriori e permette di ricostruire i margini interprossimali e cervicali in un solo passaggio, anche in presenza di diga o fili di retrazione gengivale, riducendo così il tempo necessario al restauro. Le alette della matrice permettono un posizionamento veloce ed efficace. Inoltre la matrice Unica, quando posizionata, permette al dentista di visualizzare la forma finale del restauro.



Faccette in composito

per maggiori informazioni



kit



Unica Introkit anterior - REF 6900

- 35 pz. Unica anterior matrici
- 40 pz. myWedge XS
- 40 pz. myWedge S
- 40 pz. myWedge M
- 1 pz. myCustom Resin, siringa da 3 ml
- 7 pz. punte di ago calibro 18
- 1 pz. myQuickmatrix Forceps, pinza

ricariche



Unica anterior matrici
REF 6912 12 pz.
REF 6950 50 pz.



REF 5703
myQuickmatrix Forceps



REF 7101
myWedge
Extrasmall (XS) 100 pz.



REF 7102
myWedge
Small (S) 100 pz.



REF 7103
myWedge
Medium (M) 100 pz.



REF 6811
myCustom Resin
siringa da 3 ml e 10 pz. punte di ago calibro 18

Classe III restauro

Nel caso di una cavità di III Classe dove il margine prossimale è assente, Unica è molto utile in quanto permette al dentista di visualizzare la forma finale anche prima di procedere con il restauro.

Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia



per
maggiori
informazioni

Classe IV restauro

Per questo restauro di IV Classe, Unica aiuta a ripristinare il profilo cervicale e interprossimale anatomicamente e in modo molto rapido.

Dr. Dan Lazar
Oradea, Romania



per
maggiori
informazioni



Unica
anterior
matrices



myCustom
resin

myQuickmatrix
Forceps

myWedge

 polydentia
swiss manufacture

Faccette in composito

Grazie alla nuova matrice Unica abbiamo la possibilità di restaurare contemporaneamente i margini cervicali e interprossimali con significativi vantaggi in termini di gestione della forma e predicibilità del restauro.

Dr. Monaldo Saracinelli &
Dr. Antonino Nicolò
Italia



per
maggiori
informazioni



Modifiche di forma


Il design particolare di Unica rende la matrice la soluzione essenziale per le modifiche di forma permettendo al dentista di restaurare contemporaneamente i margini interprossimali e cervicali.

Dr. Carlos Fernández Villares
Madrid, Spagna



per
maggiori
informazioni



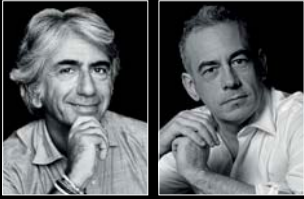

Styleitaliano

fondato dal
Dr. Walter Devoto e
Prof. Angelo Putignano

Style Italiano è un gruppo di appassionati clinici dentisti e ricercatori, in costante sviluppo di materiali e tecniche per l'odontoiatria estetica e conservativa. La loro filosofia si basa sullo sviluppo di soluzioni per rendere l'eccellenza nell'odontoiatria estetica e funzionale accessibile a tutti.

Per Polydentia, la collaborazione con Style Italiano non è solo una fonte di ispirazione. È un'opportunità per rinnovare costantemente il suo impegno a mettere l'eccellenza della produzione svizzera al servizio dell'odontoiatria in tutto il mondo.



Visita "Unica,
Community"
per condividere
i casi clinici di
Unica anterior

Seguici
#thinkunica



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch

